

## Domande frequenti



1. AMS 700™ with MS Pump Series Inflatable Penile Prosthesis Patient Manual.  
American Medical Systems, Inc. 2019.

Tutti i marchi commerciali citati appartengono ai legittimi proprietari.

ATTENZIONE: la legge limita la vendita di questi dispositivi esclusivamente ai medici o dietro prescrizione medica. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l'uso sono riportate nell'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. I prodotti sono mostrati esclusivamente a scopo INFORMATIVO e potrebbero non essere approvati o in vendita in determinati Paesi. Questo materiale non è destinato all'uso in Francia.

Prodotto disponibile esclusivamente nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Si prega di verificare la disponibilità contattando il rappresentante di vendita o l'assistenza clienti di zona.

Tutte le immagini sono di proprietà di Boston Scientific. Tutti i marchi commerciali appartengono ai legittimi proprietari.

MH-1086002-AA. Prodotto da Gosling.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

Copyright © 2021 di  
Boston Scientific Corporation  
o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
DINURO2484IA

**GLI IMPIANTI PENIENI SERIE AMS 700™  
PER IL TRATTAMENTO DELLA DISFUNZIONE ERETTILE**

# Domande frequenti sulla procedura

## Si tratta di una procedura con ricovero ospedaliero?

Di solito lo è; tuttavia, si tratta di una decisione che verrà presa tra Lei e il Suo urologo.

## Quanto tempo ci vuole per eseguire una procedura di impianto penieno?

L'impianto di una protesi peniena richiede un intervento chirurgico che dura in genere tra 30 minuti e due ore.

## Gli altri si accorgeranno visivamente che ho un impianto?

Una volta posizionato, l'impianto sarà completamente invisibile. È completamente nascosto nel corpo. Nessuno lo saprà a meno che Lei non lo dica, persino negli spogliatoi.

## Quanto dolore avvertirò?

Potrebbe provare dolore o disagio in corrispondenza dei siti operatori nei primi tempi dopo l'intervento chirurgico e quando inizia a utilizzare la Sua protesi. Nella maggior parte dei casi, il dolore scompare entro poche settimane dall'intervento chirurgico; tuttavia, sono stati segnalati casi di dolore cronico.<sup>1</sup>

## Quanto tempo dovrò attendere dopo l'intervento prima di usare l'impianto?

Il medico Le farà sapere quando potrà utilizzare il dispositivo. Nel caso di protesi peniene, la maggior parte dei medici consiglia di attendere da quattro a sei settimane prima di avere rapporti sessuali.<sup>1</sup>

## Il processo di gonfiaggio è doloroso con AMS 700?

Per gonfiare un impianto AMS, bisogna comprimere la pompa nello scroto, che invierà liquido nei cilindri nel pene. Ciò richiede una buona destrezza manuale, ma non dovrebbe essere doloroso. In caso di dolore, contatti il Suo medico.<sup>1</sup>

## Gli impianti penieni Boston Scientific sono compatibili con la RM?

Gli impianti Boston Scientific sono a compatibilità RM condizionata, il che significa che un paziente con questo dispositivo può essere sottoposto a scansione in determinate condizioni, ma non in tutte. Consulti il Suo urologo.

## Domande comuni da porre al medico

### Cosa devo fare prima della procedura?

### Quali sono i rischi dell'intervento?

### Quanto sono soddisfatti i pazienti dei risultati di questa procedura?

### Quali sono i possibili effetti collaterali?


### Sarò in grado di guidare da solo per tornare a casa dopo la procedura?

### Cosa devo fare per garantire una guarigione adeguata?

## Risorse aggiuntive

### Vivere con un dispositivo

Se desidera saperne di più o ha domande relative a cosa significa vivere con un impianto, visiti il sito Web [www.EDTreatments.com](http://www.EDTreatments.com).

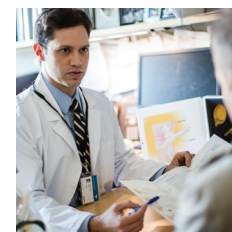

Per qualsiasi domanda, contatti il Suo medico in qualsiasi momento prima o dopo la procedura.